

Transfert du patient hors du lit

Des transferts latéraux et en position assise hors du lit sont obligatoires pour les patients. Une variété d'aides à la manipulation du patient est mise à la disposition des soignants.

Transferts latéraux

Lorsqu'un transfert hors du lit en position de décubitus dorsal s'impose, par exemple sur un brancard, une table de verticalisation ou un fauteuil multiposition tel que le Sara Combilizer®, une aide au transfert latéral ou un lève-personne peut être utilisé(e).



Maxi Slides®

- Les draps de transfert sont fabriqués dans une matière à ultra-basse résistance à la friction présentant d'excellentes propriétés de glissement dans les deux sens.
- Une gamme complète de draps Maxi Slide™ Flites à usage unique et de draps Maxi Slides™ lavables et réutilisables est proposée aux soignants pour le repositionnement quotidien des patients.



Maxi Sky 2/MaxiMove®

- Lève-personne sur rail Maxi Sky 2 et lève-personne au sol MaxiMove.
- Pour des transferts en position assise et latéraux avec une diversité de berceaux et de harnais Arjo répondant précisément aux besoins du patient.
- Le lève-personne sur rail Maxi Sky 2 peut être utilisé pour l'entraînement à la marche avec des harnais de marche qui protègent le patient des chutes lors de cette activité.
- Il est primordial de sélectionner un harnais ad hoc, qui tienne compte de la disposition à la mobilité/de la sécurité des patients pour veiller à leur transfert sans danger, quel que soit leur état de motricité.

Maxi Air®

- Matelas pneumatique à usage unique réservé aux transferts latéraux.
- Ce système comprend un matelas gonflable perforé et une pompe d'alimentation d'air.
- Le dessous perforé du matelas permet à l'air de circuler à l'intérieur de sorte à créer un coussin qui allège la charge statique, diminuant les forces de pression/traction et garantissant le transfert confortable et sécurisé du patient.



Maxi Transfer Sheet

- Combiné avec le lève-personne sur rail Maxi Sky 2 ou le lève-personne au sol MaxiMove.
- Le drap-harnais double fonction Maxi Transfer Sheet est conçu pour remplacer le drap de lit d'hôpital.
- Présentant les avantages d'un harnais de transfert pour le transfert latéral et servant aussi de linge de lit, le drap-harnais Maxi Transfer Sheet est fait d'un tissu doux et aéré et peut être laissé sous le patient entre les transferts.

