

Position debout active

Dès que le patient est capable de garder son équilibre en position assise avec un soutien minimal et de bouger ses jambes pour défier la gravité, des essais de placement en position debout peuvent être réalisés.

L'une des solutions pour les patients qui ont des difficultés à se redresser complètement est d'avoir recours à un verticalisateur. Le verticalisateur simplifie les activités de redressement précoce, telles que les transferts en position debout, les exercices de support de poids et la pratique de la position debout. Il peut être manipulé par une seule personne; par conséquent, les transferts sécurisés sur le fauteuil ne requièrent qu'un seul soignant.



Sara® Plus

- Le verticalisateur Sara Plus peut être utilisé avec les patients dont l'équilibre en position assise est satisfaisant et qui peuvent participer à la thérapie.
- Il est équipé d'un harnais de soutien qui enserre la taille et aide le patient à rester droit.
- Il diminue la charge et nécessite moins de personnel lors des transferts.
- Le repose-pieds et l'appui genoux sont amovibles si le patient teste la marche.

Sara® Stedy

À mesure que le patient poursuit ses progrès, il se peut qu'il réussisse à se redresser complètement, mais sans pouvoir se déplacer. En général, cette phase est synonyme de frustration pour le patient et le personnel soignant l'appréhende, car le patient essaie de faire quelques pas pour atteindre le fauteuil. Le verticalisateur Sara Stedy peut alors être employé pour mobiliser efficacement les patients et les aider à se tenir debout et à passer sur un fauteuil avec une intervention minimale de la part du soignant.

- Destiné aux patients qui sont capables de se tenir debout avec ou sans assistance mais ne peuvent pas marcher.
- Bonne stabilité du tronc et équilibre en position assise autonome obligatoires.
- Barre de soutien avec appui genoux et support de bassin.
- Transferts sécurisés avec effectif réduit.

